

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

ASPIRATORE NASALE PER INFANTE

REF	RDM	CND
FOR.70-546	1854348	V0299

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

L'aspiratore nasale per infante, è utile per liberare il naso dal muco in eccesso in modo pratico ed efficace. Permette al bambino di respirare meglio, facilita la poppata e né favorisce un sonno tranquillo. La forma ergonomica del beccuccio è particolarmente indicato per adattarsi alle narici delicate dei più piccoli.

ISTRUZIONI D'USO


Appoggiare il bambino sulla schiena, premere l'aspiratore, inserire il beccuccio nella narice tenendo chiusa l'altra e rilasciare l'aspiratore con delicatezza. Ripetere l'operazione nell'altra narice. Dopo ogni utilizzo, smontare il beccuccio dal pallone e lavare accuratamente con acqua tiepida e sapone, sia internamente che esternamente e lasciare asciugare. Si raccomanda di mantenere l'aspiratore nasale sempre pulito.

MATERIALI

Pompetta a bulbo blu in PVC morbido per uso medico. Beccuccio trasparente in PVC medicale. Cadmio assente.

SPECIFICHE TECNICHE

Bulbo in PVC medicale morbido.
Peso della pompetta: 20 ± 0.5 g.
Peso della punta: 3g.
Bulbo: $\varnothing 41$ mm x H57 mm circa.
Beccuccio: $\varnothing 16$ mm x H30 mm circa.
Foro del beccuccio: $\varnothing 4$ mm circa.

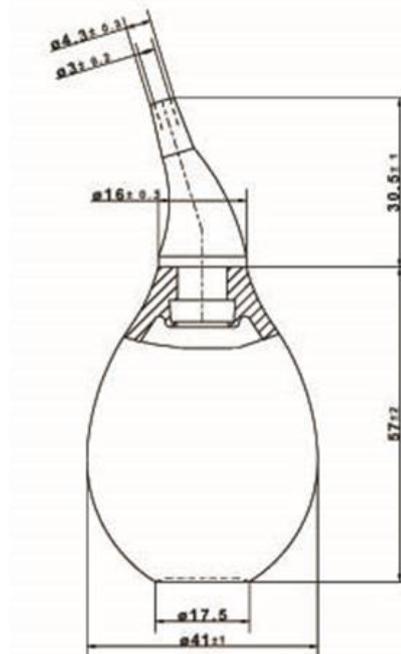

VALIDITÀ

5 anni.

AVVERTENZE

Previo consulto del medico, si raccomanda di utilizzare il dispositivo prestando attenzione alla forza applicata sulla pompetta e alla frequenza nell'utilizzo dello stesso. Non sterilizzare o far bollire. Non utilizzare se il dispositivo risulta danneggiato e/o non integro in alcune sue parti.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CONFEZIONAMENTO

Confezionati singolarmente in sacchetto all'interno di un astuccio.

CONSERVAZIONE

Il dispositivo viene fornito con l'imballo standard della For.me.sa. che ne garantisce il corretto stoccaggio. Per mantenere la corretta conservazione nel tempo si consiglia di utilizzare sempre l'imballo originale congiuntamente ad un ambiente asciutto, al riparo da polveri e materiali nocivi.
Tenere lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.
Non sono presenti sostanze tossiche nel materiale di origine.

Fabbricante <i>Manufacturer</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti e Bambini (Adults and Child)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 <i>Medical Device Class I, in compliance with 2017/745 Regulation</i>