

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

BORSA ACQUA CALDA BILAMELLATA DELUXE DOLPHIN

REF	RDM	CND
70-501.DO	2165439	V0401

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

La borsa dell'acqua calda ha lo scopo di alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generati da malattie sul corpo umano, quali: dolori muscolari e contratture, sciatalgie lombari, mal di schiena, dolori mestruali, per crampi allo stomaco e dolori di origine reumatica.

Il calore genera un maggior afflusso di sangue nella zona prescelta che induce una riduzione della contrazione dell'organo o della zona interessata, esercitando un effetto analgesico ed una distensione muscolare.

Non va mai usato, però, se c'è un'inflammatione acuta, traumatica o un'infezione in corso: infatti, aumenterebbe l'afflusso di sangue, peggiorando il gonfiore e il dolore.

Il liquido da utilizzare al proprio interno può essere solo acqua potabile ad una temperatura adeguata.

ISTRUZIONI D'USO

1. Si consiglia di preparare acqua calda ad una temperatura non superiore a 40°C, al fine di evitare possibili ustioni. Svitare il tappo e riempire lentamente la borsa con l'acqua. Durante il riempimento, tenerla per il collo in posizione verticale.
2. Eliminare l'aria in eccesso inclinando lentamente la borsa. Per comodità, è possibile posizionare la borsa dell'acqua calda su una superficie piana.
3. Chiudere il rubinetto e verificarne la tenuta. Riempire la borsa con acqua calda non superiore ai 40° C. Afferrare la borsa per il collo in modo da avere una presa più stabile, se si tiene per il corpo la parte superiore potrebbe afflosciarsi e rovesciare il contenuto. Avvitare il tappo serrandolo completamente e fare una prova inclinando leggermente la borsa per verificare che non ci siano perdite. Una volta che l'acqua si è raffreddata appendere la borsa capovolta in modo da espellere ogni residuo di acqua. Non lasciarla asciugare all'aria in zone sottoposte a sbalzi termici oppure alla luce diretta del sole (entrambi i casi danneggiano la gomma di cui è costituita la borsa).

CONTROINDICAZIONI

Il calore è, controindicato in presenza di traumi e infiammazioni. Ad esempio, in caso di mal di pancia è sempre bene escludere un'eventuale appendicite prima di utilizzare il calore come rimedio.


MATERIALI

Corpo della borsa in gomma naturale e il tappo di chiusura in ABS: polimero termoplastico. Non contiene lattice.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità: 2000 ml

Peso: 494 g

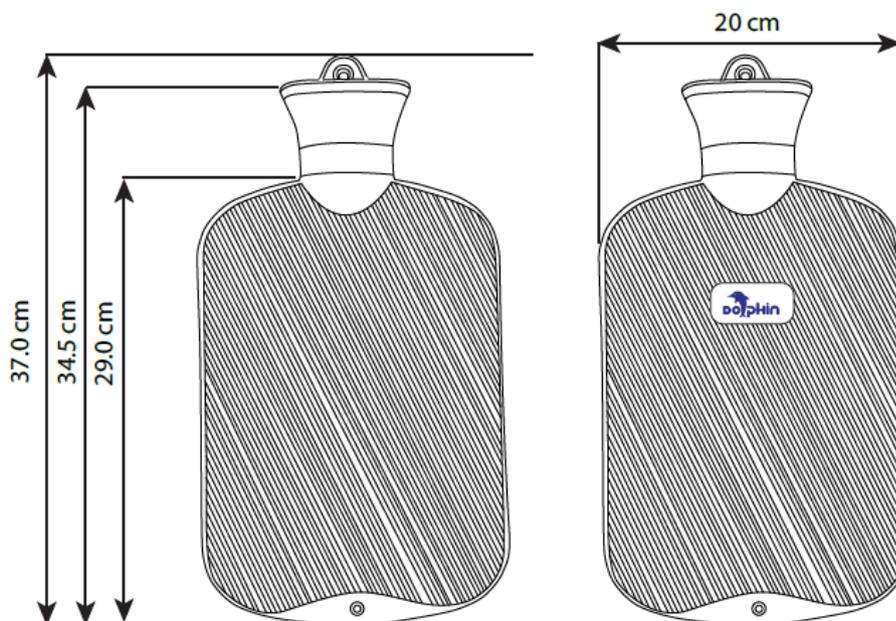

VALIDITÀ

5 anni

AVVERTENZE

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente. Non riscaldare nel microonde. Evitare di appoggiare il prodotto a contatto diretto con la pelle. Non maneggiare la borsa dell'acqua calda con oggetti appuntiti o taglienti.

CONFEZIONAMENTO

In sacchetto di polietilene (PE-LD).

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Non sono presenti sostanze tossiche nel materiale di origine.

Fabbricante <i>Manufacturer</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 (<i>Medical device class I, in compliance with Regulation 2017/745</i>)