

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

BANDA BIADESIVA IDROCOLLOIDE

REF	CND	RDM
FOR.007.1000	U0780	1752435

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

La banda biadesiva idrocolloide permette di fissare le guaine per incontinenza urinaria maschile. Sono facili da applicare e allo stesso tempo garantiscono un fissaggio sicuro della guaina. La banda idrocolloide è costituita da uno strato di morbido gel e un adesivo di materiale idrofilo sensibile alla pressione.

ISTRUZIONI D'USO

1. Pulire ed asciugare il pene prima dell'applicazione, se necessario, eliminare i peli pubici. Non usare talco o creme.
 2. Rimuovere da un solo lato la pellicola protettiva della banda biadesiva.
 3. Applicare la banda a spirale attorno al pene e rimuovere la seconda pellicola.
- Accertarsi che la banda biadesiva non sia troppo stretta per evitare il blocco della circolazione.
Sostituire all'occorrenza.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali usati.
Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi. Non riutilizzare.

MATERIALI

PU film: semitrasparente, impermeabile e traspirante.
Idrocolloide: molecole polisaccaridiche (sodio carbossimetilcellulosa, adipato diottile, elastomero, ecc.).
Carta di rilascio: 120-140 g/m² carta siliconata di rilascio.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni: 1,7 x 12,8 cm;
Spessore: 1 mm circa;
Capacità di adesione: <2.5 mm (mantenimento 30min);
Resistenza alla pelatura: 1.0 N/cm.

VALIDITÀ

5 anni.

AVVERTENZE

Non sterile, né sterilizzabile. Non riutilizzabile. Nel caso di possibile sensibilità ai prodotti contenuti consultare il proprio medico. Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente.

CONFEZIONAMENTO

Confezione da 30 pezzi in astuccio.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale, in un ambiente fresco e asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole, al riparo da polveri e materiali nocivi.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Non sono presenti sostanze tossiche nel materiale di origine.

Fabbricante <i>Manufacturer</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 (<i>Medical device class I, in compliance with Regulation 2017/745</i>)