

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

CIAMBELLA GONFIABILE IN GOMMA CON POMPETTA - DELUXE

REF	RDM	CND
70-506.01P <i>misura 35</i>	2297389	V08030102
70-506.02P <i>misura 40</i>	2296655	
70-506.04P <i>misura 43</i>	2296666	
70-506.03P <i>misura 45</i>	2297476	

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione seduta per prolungati periodi di tempo, o dopo un intervento chirurgico.

Il dispositivo deve essere gonfiato con aria prima dell'uso. Disponibile in quattro misure diverse.

ISTRUZIONI D'USO

- Prima di procedere all'utilizzo del dispositivo, eseguire una pulizia accurata della superficie esterna con acqua tiepida e sapone neutro.
- Non utilizzare mezzi abrasivi e detergenti diversi da quelli indicati che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Asciugare prestando particolare attenzione alla valvola di gonfiaggio.
- Gonfiare il dispositivo mediante pompetta (qualora facente parte del confezionamento) o mediante compressore manuale (tipo pompa per biciclette).
- Ripetere tale operazione secondo necessità. Procedere ad un gonfiaggio moderato.
- Eccessivi rigonfiamenti potrebbero causare rotture e/o danneggiamenti irreversibili.
- Appoggiare il dispositivo prima dell'uso su superfici piane.
- A fine utilizzo eseguire un'accurata pulizia e conservare il dispositivo sgonfio, al riparo da luce e polvere.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali usati.

Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi. Utilizzare solo su cute integra e secondo le indicazioni riportate

MATERIALI


Gomma naturale, priva di lattice.

SPECIFICHE TECNICHE

Carico massimo 135 kg

Ciambella disponibile in quattro taglie differenti in base al diametro: Ø35 cm; Ø40 cm; Ø43 cm; Ø45 cm.

Dotata di valvola per il flusso d'aria, con cucitura ed estremamente robusta.

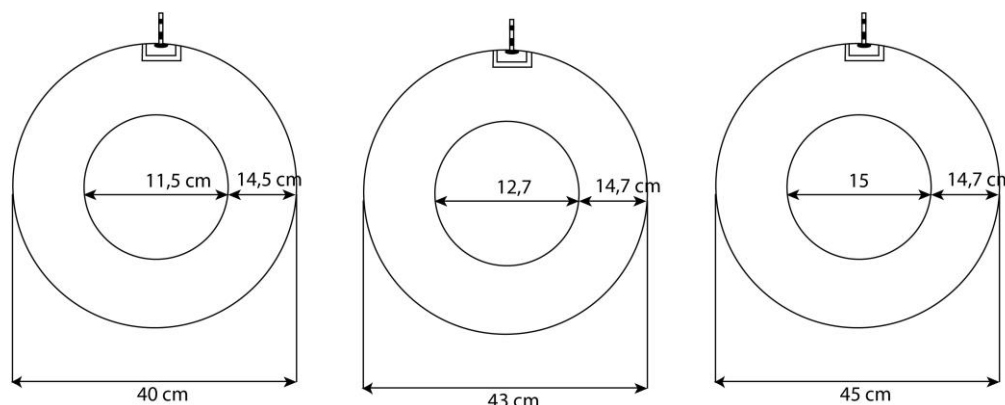

Gomma	100 g/m ²	Cera di paraffina	3.6 g/m ²
Carbonato di calcio	800 g/m ²	Miscela di Fenoli stirenici	24 g/m ²
Pigmento rosso	10 g/m ²	Trimetilquinoline	8 g/m ²
Fiocchi di acido stearico	11 g/m ²	Tiazolo attivato	12 g/m ²
Ossido di Zinco	50 g/m ²	Zolfo	12 g/m ²
Diossido di Titanio	33 g/m ²	Tetrametiltiurame disolfuro	0.5 g/m ²


Misura pompetta:

Diametro bulbo: 52 mm

Altezza bulbo: 72 mm

Lunghezza del tubo: 260 mm

Gomma	49.45 %
Carbonato di calcio	47.66 %
Ossido di Zinco	2.17 %
Pigmento rosso	0.51 %
1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline	0.21 %

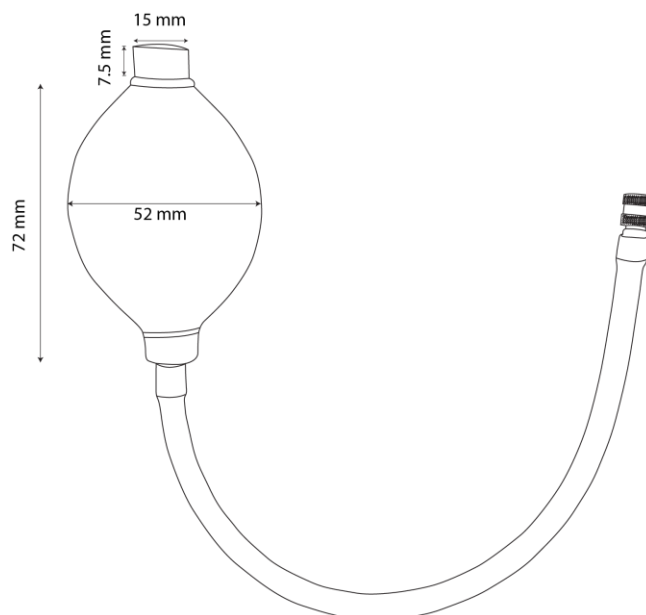

VALIDITA'

5 anni.

AVVERTENZE

Non sterile, né sterilizzabile. Nel caso di possibile sensibilità ai prodotti contenuti consultare il proprio medico. Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONAMENTO


Sacchetto in polietilene (PE-LD) contenete: 1 ciambella e 1 pompetta.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale, in un ambiente fresco e asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole, al riparo da polveri e materiali nocivi.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Fabbricante <i>Manufacturer</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 (<i>Medical device class I, in compliance with Regulation 2017/745</i>)