


SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

MASCHERINA GEL VISO E OCCHI

REF	RDM	CND
FOR.010.102 <i>occhi</i>	1693032	M030504
FOR.010.103 <i>viso</i>	1693290	

IMMAGINE

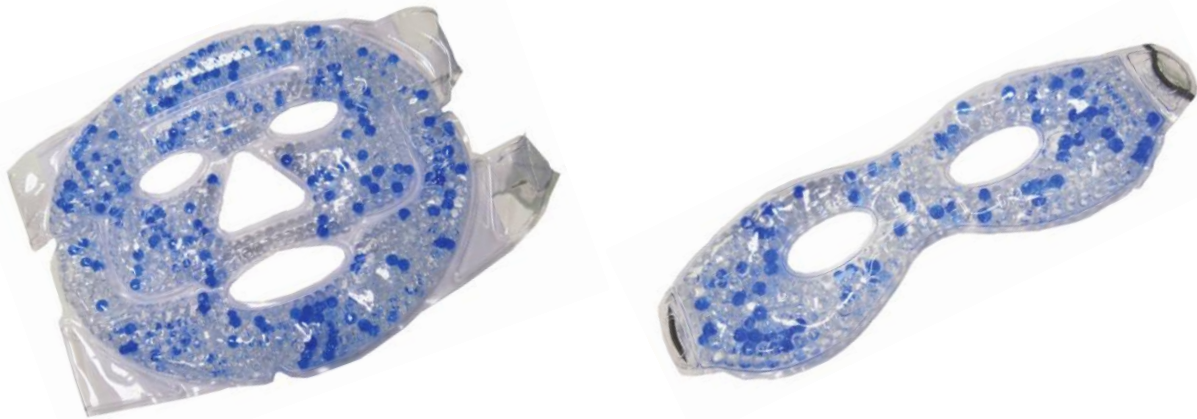

DESCRIZIONE GENERALE

Le mascherine con microsfere di morbido gel, sono utilizzate per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni sul corpo umano.

La terapia del caldo allevia tensioni e dolori provocati da mal di testa, sinusite e in tutti i casi in cui si necessita l'applicazione del caldo.

La terapia del freddo controlla e allevia dolore causati da lividi e ustioni; lenisce il dolore e il disagio indotti da febbre, mal di testa, mal di denti e puntura di insetti e in tutti i casi in cui si necessita la crioterapia.

Entrambe donano sollievo a seguito di interventi di chirurgia estetica

ISTRUZIONI D'USO

Terapia del caldo: Immergere la mascherina in acqua calda non superiore ai 40° per 4/6 minuti oppure nel microonde a potenza media per circa 1 minuto all'interno di un recipiente d'acqua, successivamente applicarla sulla parte interessata.

Terapia del freddo: Lasciare la mascherina in frigorifero per circa 1 ora prima di utilizzarla oppure nel congelatore in caso di urgente necessità. Estrarla dal frigorifero ed applicarla sulla parte interessata.

CONTROINDICAZIONI

Per impacco freddo:

- 1) Fenomeno di Raynauds - Una condizione che colpisce i piccoli vasi sanguigni nelle estremità.
- 2) Ipersensibilità al freddo come:
l'orticaria indotta da freddo, l'eritema da freddo o l'emoglobinuria da freddo.
- 3) Quando vi è un'area di intorpidimento o sensibilità alterata.
- 4) Condizioni cardiache alterate come l'aritmia, angina o ischemia miocardica.
- 5) Alta pressione sanguigna.
- 6) Non utilizzare su ferite aperte o in via di guarigione.

Per impacco caldo:

- 1) Malattia addominale acuta: non eseguire la terapia a caldo prima di aver chiarito una diagnosi.
- 2) Infezione purulenta.
- 3) Emorragia viscerale.
- 4) Fase preliminare di contusione o distorsione.
- 5) Eczema cutaneo/dermatite allergica.
- 6) Ferite in via di guarigione.

Sia per il freddo che per il caldo:

- 1) Sensibilità alterata nella percezione del caldo e del freddo.
- 2) Deficit cognitivi o comunicativi che precludono la percezione del dolore, inclusa la sedazione, problemi mentali o demenza.
- 3) Pelle fragile come quella degli anziani, dei bambini piccoli o dei pazienti sottoposti a terapia steroidea.

MATERIALI

Materiale esterno: PVC – Senza lattice.

Componenti delle microsferi: acqua, glicerina, poliacrilato di sodio, polietilenglicole, cloruro di sodio, glicole propilenico.

SPECIFICHE TECNICHE

	Occhi	Viso
Dimensione	24.5x7,5H cm	30,8x19H cm
Peso	65 g	200 g

Il dispositivo impiega circa 10 minuti prima di tornare a temperatura ambiente.

VALIDITÀ

5 anni

AVVERTENZE

Accertarsi prima del disimballo che il medesimo sia integro. Nel caso vi siano parti mancanti e/o danneggiate, **NON UTILIZZARE**, ma rivolgersi al rivenditore del dispositivo. Per eventuali chiarimenti rivolgersi sempre al farmacista/medico curante. Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano: integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente.

Non utilizzare la borsa del ghiaccio a contatto diretto con la cute onde evitare ustioni causate dal freddo eccessivo, meglio utilizzare una protezione, come un fazzoletto o una salvietta.

Non ingerire. Non rompere l'involucro. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CONFEZIONAMENTO

In sacchetto.

PULIZIA


Lavare la parte interna solo con acqua potabile tiepida, mentre l'esterno con acqua tiepida e sapone neutro. Non utilizzare spazzole ma solo spugne morbide per non graffiare la superficie in gomma. A fine uso svuotare il contenuto ribaltandolo verso il basso e lasciarlo sgocciolare. Non utilizzare alcool, solventi, acidi per pulire le superfici interne e esterne. In caso di lunghi periodi di inutilizzo fare asciugare le pareti interne della borsa lasciandola all'aria per alcune ore.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e l'esposizione diretta al sole.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Fabbricante /Manufacturer	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione /Application advice	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità /Compliance	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 (Medical device class I, in compliance with Regulation 2017/745)