

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

PADELLA PER AMMALATI

REF	RDM	CND	GMDN
FOR.001.009	2318903	Y091299	34867

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Padella per ammalati per la raccolta di liquidi biologici per successivi trattamenti-analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche. Prodotto rivolto ad operatori professionali di enti ospedalieri, case di cura e/o di riposo. Manico forato che permette la totale fuoriuscita dell'acqua di lavaggio o delle sostanze liquide usate per l'eventuale sterilizzazione.

ISTRUZIONI D'USO

Per l'eventuale disinfezione dopo l'uso, utilizzare esclusivamente disinfettanti appropriati seguendo le istruzioni d'uso indicate dal fabbricante del disinfettante stesso.

Prodotto autoclavabile ad una temperatura massima di 120°C.

MATERIALI

Polipropilene: materiale atossico, opaco e particolarmente resistente agli urti, sterilizzabile.

Le materie prime utilizzate sono atossiche, per usi alimentari e medicali certificate secondo le normative Europee e FDA (USA) vigenti. Priva di lattice e assenza di ftalati.

SPECIFICHE TECNICHE

Non sterile. Larghezza: 270 mm. Lunghezza compreso manico: 505 mm. Lunghezza escluso manico: 408 mm. Lunghezza manico di presa: 120 mm.	Peso: 300 g. Volume: 800 ML. Spessore: non \leq 1 mm. Temperature tollerate: +120°C Peso sopportabile: >130kg
---	---

VALIDITÀ

5 anni

AVVERTENZE

Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme o di alte fonti di calore. Sostituire il Dispositivo qualora dopo un prolungato uso dovesse assumere un aspetto giallognolo. Ogni uso diverso da quello indicato è da ritenersi improprio.

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti del dispositivo siano integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente.

CONFEZIONAMENTO

In sacchetto (PE-LD) misura 36x65 cm, di colore bianco con stampate le istruzioni d'uso italiano/inglese.


CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Prima dell'uso si considera rifiuto non pericoloso: CER 18 01 07 "sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06".

Dopo l'uso si considerano rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03 "Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni".

Fabbricante <i>Manufacturer</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 <i>(Medical device class I, in compliance with Regulation 2017/745)</i>