

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

PERETTA CON CANNULA RETTALE

REF	MISURA	RDM	CND
FOR.005.010	90 ml n°5	1806757	Y091299
FOR.005.011	145 ml n°7	1806761	
FOR.005.012	225 ml n°9	1806763	

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Peretta per il lavaggio e l'evacuazione intestinale.
Facile da utilizzare grazie alla morbida impugnatura ergonomica e la cannula rettale rigida.


ISTRUZIONI D'USO

Riempire il morbido bulbo con la soluzione indicata dal proprio medico e procedere con l'irrigazione. Dopo il lavaggio lavare con cura il contenitore e la cannula. Prima di ogni utilizzo e dopo l'uso, lavare la peretta e la cannula con acqua tiepida.

MATERIALI


Bulbo in morbido PVC. Cannula rigida in polipropilene di colore bianco. Non contiene Bisfenolo A (BPA). Senza lattice.

SPECIFICHE TECNICHE

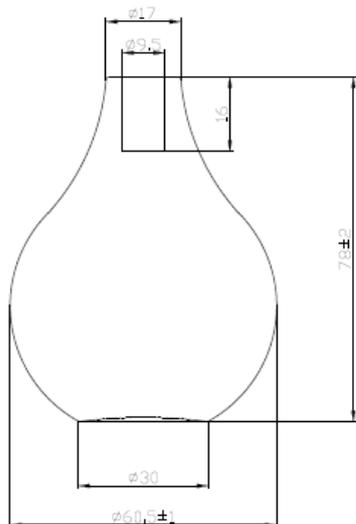


N° 5

Capienza: 89 ml - Peso: 42±1 g - Misura: 60,5x78mm

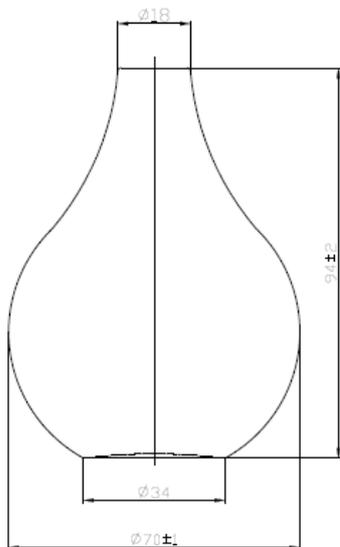

N° 7


Capienza: 143 ml - Peso: 64±1 g - Misura: 70x94mm

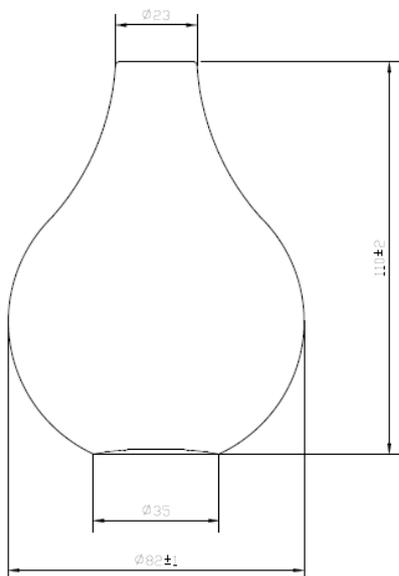

N° 9

Capienza: 224 ml - Peso: 100±1 g - Misura: 82x110mm

Cannula bianca

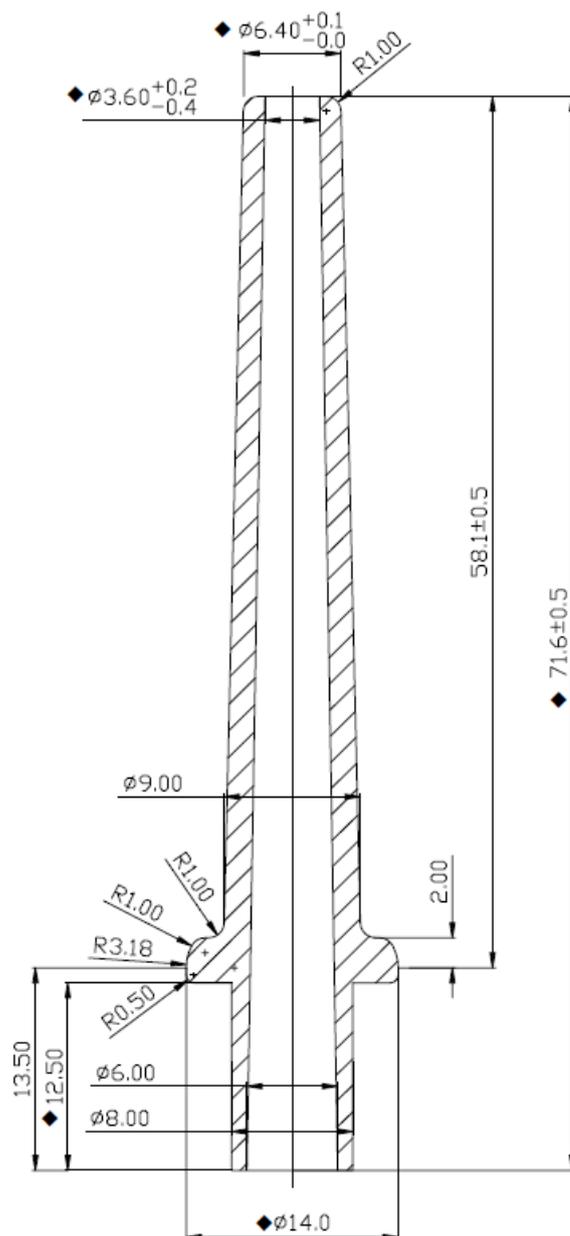

VALIDITÀ

5 anni.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato solo per la sua destinazione d'uso.

- Prima di ogni utilizzo e dopo l'uso, lavare la peretta e la cannula con acqua tiepida.
- Non utilizzare perette danneggiate.
- Non sterilizzare in autoclave.
- Non utilizzare all'interno di dispositivi a microonde.
- Non utilizzare alcool, solventi, grassi, oli e acidi a contatto con il prodotto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di reazioni allergiche sospendere l'uso del prodotto e contattare il proprio medico curante.

CONFEZIONAMENTO

Confezionati singolarmente in sacchetto.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri e materiali nocivi.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Fabbricante <i>Manufacturer</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti e Bambini (Adults and Child)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 <i>Medical Device Class I, in compliance with 2017/745 Regulation</i>