


SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

SACCA URINA DA GAMBA DA 750 cc E TUBO DA 10 cm Con laccetti e bottoni

REF	RDM	CND
FOR.003.009 - tubo da 10 cm - confezione 10 pezzi	1810425	A06030301
FOR.003.022 - tubo da 10 cm - confezione 30 pezzi	1810426	

IMMAGINE

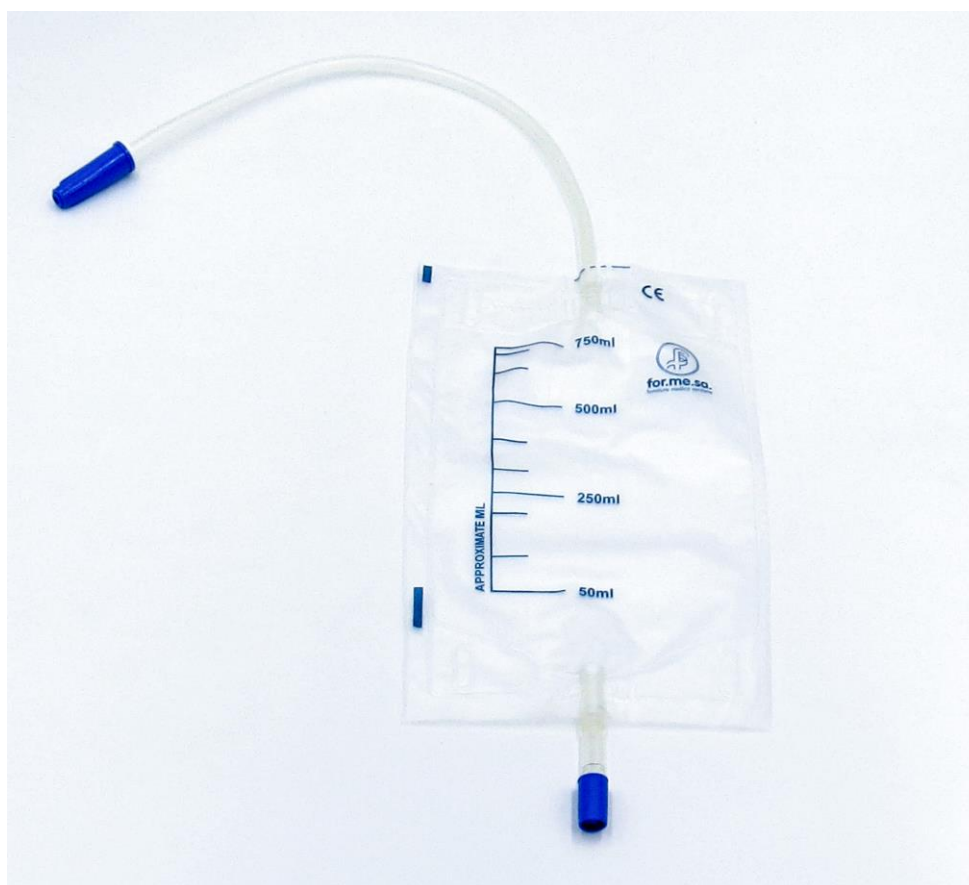

DESCRIZIONE GENERALE

La sacca urina da gamba è un dispositivo utilizzato per la raccolta e smaltimento dell'urina. La valvola di non ritorno evita il reflusso di urina e riduce al minimo il rischio di infezioni. Il tappo a scatto consente uno svuotamento rapido e igienico della sacca. Due fasce di chiusura in tessuto con bottoni sono incluse in ciascuna confezione per il fissaggio sicuro della sacca.

Sacca graduata con capienza massima di 750cc, con scarico.

ISTRUZIONI D'USO

La sacca da gamba deve essere allacciata in maniera appropriata, al fine di consentire all'urina di fluire nella sacca senza difficoltà. Fissare la sacca in alto e in basso attorno alla coscia o al polpaccio con le due fasce in dotazione.

Durante l'utilizzo, evitare piegature o schiacciamenti della sacca e del tubo. Espellere l'aria eventualmente presente all'interno della sacca prima dell'utilizzo. Utilizzare sempre guanti protettivi.

Il dispositivo non è riutilizzabile.


MATERIALI

Tappo di protezione: in PE

Tubo: in PVC trasparente

Non contiene lattice

SPECIFICHE TECNICHE

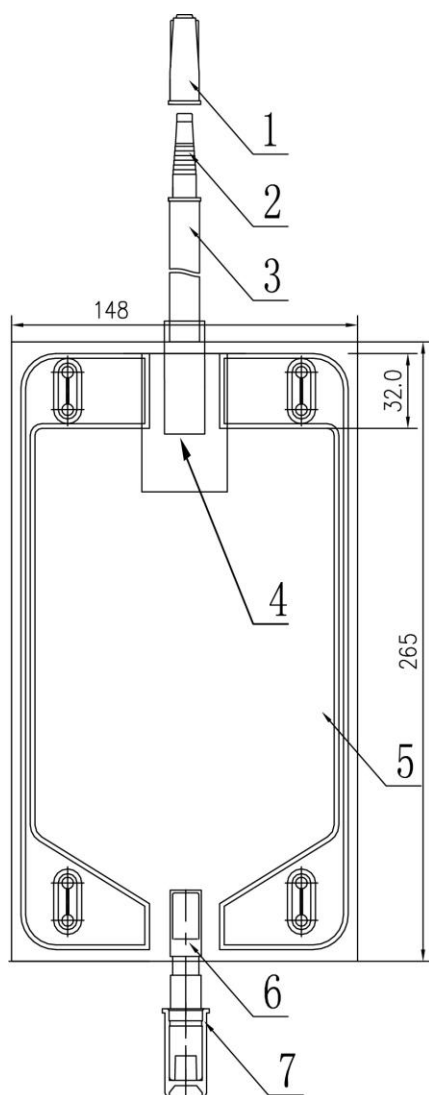

- 1 Tappo connettore PE
- 2 Connettore PVC
- 3 Tubo PVC
- 4 Valvola di non ritorno PVC
- 5 Sacca PVC
- 6 Tubo di uscita PVC
- 7 Tappo a pressione PVC/PE

Sacca graduata: 148x265 mm.
Capienza massima 750cc.
Tubo: 10 x0,12 cm

VALIDITÀ

5 anni.

AVVERTENZE

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente. Evitare il contatto con solventi chimici e l'esposizione a fonti di calore durante la conservazione. Non manipolare con utensili taglienti o appuntiti. Seguire una corretta e accurata igiene delle mani e utilizzare i guanti monouso, per evitare lo sviluppo di infezioni urinarie. Il dispositivo non è riutilizzabile.

CONFEZIONAMENTO


In sacchetto per le confezioni da 10 e 30 pezzi.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.
Per lo svuotamento dei modelli senza scarico strappare sull'indicazione "Tear".

Fabbricante /Manufacturer	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione/ Application advice	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità Compliance	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento EU 2017/745 (<i>Medical Device Class I, compliance EU Regulation 2017/745</i>)