

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

SACCA URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO E SCARICO 2000 cc Tubo da 130 cm standard (NRV)

| REF | RDM | CND |
|--|---------|-----------|
| FOR.003.007 <i>sfuse</i> | 1810395 | A06030301 |
| FOR.003.008 <i>confezione 10 pezzi</i> | 1810396 | |
| FOR.003.021 <i>confezione 30 pezzi</i> | 1810397 | |

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

La sacca urina è un dispositivo utilizzato per la raccolta e smaltimento dell'urina.
Sacca graduata con capienza massima di 2L, con scarico.


ISTRUZIONI D'USO

Collocare la sacca in basso nell'apposito sostegno, in posizione verticale, e con il tubo di adduzione rivolto verso l'alto. Durante l'utilizzo, evitare piegature o schiacciamenti della sacca e del tubo. Espellere l'aria eventualmente presente all'interno della sacca prima dell'utilizzo. Per i modelli forniti di rubinetto di scarico, verificare la chiusura prima del suo utilizzo. Utilizzare sempre guanti protettivi. Il dispositivo non è riutilizzabile.

MATERIALI

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Tappo di protezione: in PE | Connettore: in PVC |
| Tubo: in PVC trasparente | Sacca: in PVC |
| Non contiene lattice | |

SPECIFICHE TECNICHE

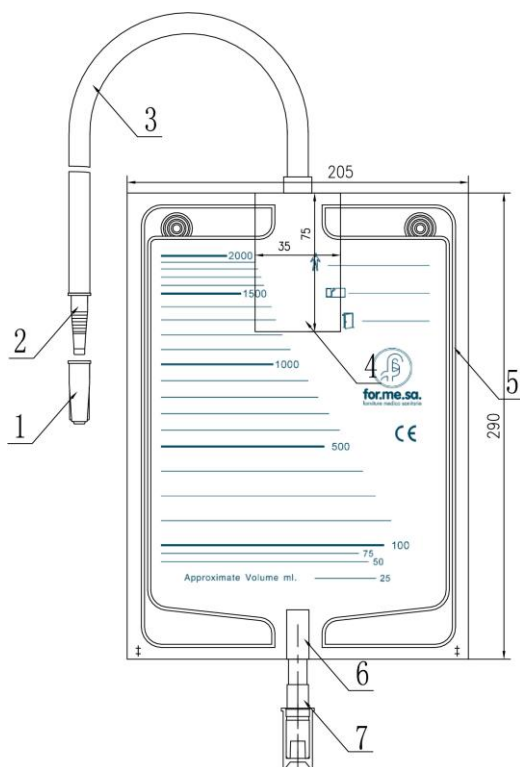

- 1 Tappo connettore PE
- 2 Connettore PVC
- 3 Tubo PVC
- 4 Valvola di non ritorno PVC
- 5 Sacca PVC
- 6 Tubo di uscita PVC
- 7 Tappo a pressione PVC/PE

Sacca graduata: 205x290 mm.
Capienza massima 2L.
Tubo: 130 x0,12 cm

VALIDITÀ

5 anni.

AVVERTENZE

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente. Evitare il contatto con solventi chimici e l'esposizione a fonti di calore durante la conservazione. Non manipolare con utensili taglienti o appuntiti. Seguire una corretta e accurata igiene delle mani e utilizzare i guanti monouso, per evitare lo sviluppo di infezioni urinarie. Il dispositivo non è riutilizzabile.

CONFEZIONAMENTO


In sacchetto per le confezioni da 10 e 30 pezzi.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Per lo svuotamento dei modelli senza scarico strappare sull'indicazione "Tear".

| | |
|--|---|
| Fabbricante /Manufacturer | For.me.sa. Srl |
| Campo di applicazione/ Application advice | Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I |
| Conformità Compliance | Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento EU 2017/745 (Medical Device Class I, compliance EU Regulation 2017/745) |