


SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

SACCA URINA SENZA SCARICO 2000 cc Tubo da 130 cm standard (STD)

REF	RDM	CND
FOR.003.003 <i>sfuse</i>	1810383	A06030301
FOR.003.004 <i>confezione 10 pezzi</i>	1810387	
FOR.003.020 <i>confezione 30 pezzi</i>	1810389	

IMMAGINE

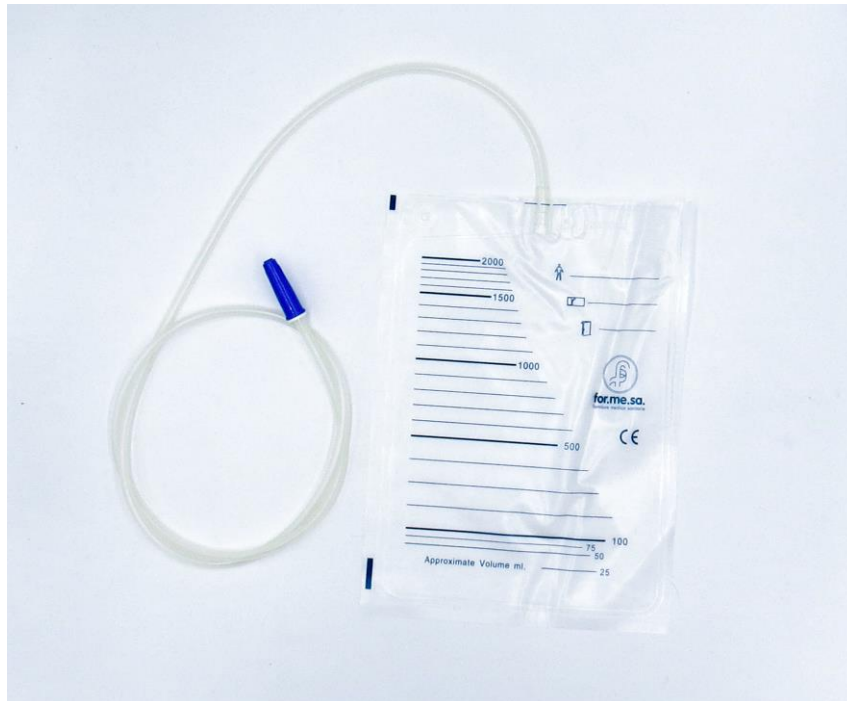

DESCRIZIONE GENERALE

La sacca urina è un dispositivo utilizzato per la raccolta e smaltimento dell'urina.
Sacca graduata con capienza massima di 2L, senza scarico.


ISTRUZIONI D'USO

Collocare la sacca in basso nell'apposito sostegno, in posizione verticale, e con il tubo di adduzione rivolto verso l'alto. Durante l'utilizzo, evitare piegature o schiacciamenti della sacca e del tubo. Espellere l'aria eventualmente presente all'interno della sacca prima dell'utilizzo. Per i modelli forniti di rubinetto di scarico, verificare la chiusura prima del suo utilizzo. Utilizzare sempre guanti protettivi. Il dispositivo non è riutilizzabile.

MATERIALI

Tappo di protezione: in PE	Connettore: in PVC
Tubo: in PVC trasparente	Sacca: in PVC
Non contiene lattice	

SPECIFICHE TECNICHE

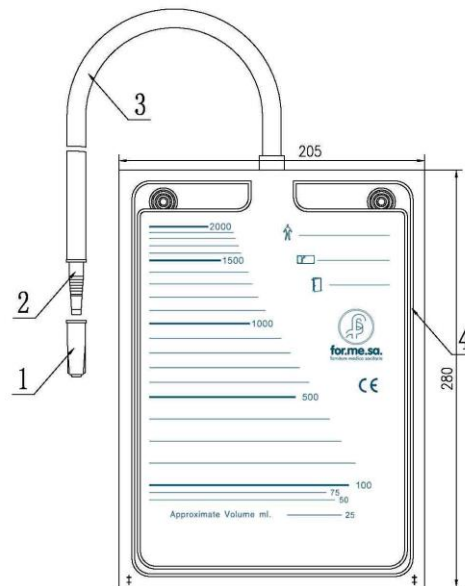

Sacca graduata: 205x280 mm.
Capienza massima 2L.
Tubo: 130 x0,12 cm

- 1 Tappo del connettore PE
- 2 Connettore PVC
- 3 Tubo PVC
- 4 sacca PVC

VALIDITÀ

5 anni.

AVVERTENZE

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente. Evitare il contatto con solventi chimici e l'esposizione a fonti di calore durante la conservazione. Non manipolare con utensili taglienti o appuntiti. Seguire una corretta e accurata igiene delle mani e utilizzare i guanti monouso, per evitare lo sviluppo di infezioni urinarie. Il dispositivo non è riutilizzabile.

CONFEZIONAMENTO


In sacchetto per le confezioni da 10 e 30 pezzi.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Per lo svuotamento dei modelli senza scarico strappare sull'indicazione "Tear".

Fabbricante <i>Manufacturer</i>	For.me.sa. Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento EU 2017/745 (<i>Medical Device Class I, compliance EU Regulation 2017/745</i>)