

Мъжки уринарен презерватив за инконтиненция – Инструкции за употреба

Приложение

1. Измийте и подсушете пениса преди употреба и, ако е необходимо, отстранете срамните косми.
Не използвайте талк или кремове.
 2. Отстранете защитното фолио **само от едната страна** на двустранната самозалепваща лента.
 3. Увийте лентата спираловидно около пениса и отстранете второто фолио.
 4. Поставете презерватива върху пениса, **като оставите разстояние между главичката и торбичката на презерватива**, за да се улесни изтичането на урината.
 5. Разгънете презерватива върху лепящата лента и **леко притиснете**, за да осигурите добро прилепване.
 6. Свържете презерватива с торбичката за събиране на урина.
-

Премахване

Внимателно навийте презерватива, за да улесните отстраняването.
След това отстранете двустранната лепяща лента.

Предупреждения

- **Не използвайте продукта, ако имате известна алергия към латекс.**
- Препоръчва се **смяна на презерватива на всеки 24 часа**.
- **Добрата локална хигиена** преди поставяне е от съществено значение.
- **Не стягайте прекалено лепящата лента**, за да избегнете проблеми с кръвообращението.
- Продуктът е **нестерилен, неподлежащ на стерилизация**.
- Препоръчва се използване заедно с двустранни лепящи ленти.
- Да се съхранява извън обсега на деца.

Всеки сериозен инцидент, произтичащ от използването на това медицинско изделие, трябва да бъде съобщен на производителя и на компетентния орган в държавата членка, в която пребивавате.

Изхвърляне

Изхвърлете медицинското изделие съгласно местните разпоредби за отпадъци.
Не съдържа токсични вещества.