

Funda urinaria masculina para incontinencia – Instrucciones de uso

Aplicación

1. Lavar y secar el pene antes del uso y, si es necesario, eliminar el vello púbico.
No usar talco ni cremas.
 2. Retirar la película protectora de **un solo lado** de la tira adhesiva de doble cara.
 3. Colocar la tira adhesiva en espiral alrededor del pene y retirar la segunda película.
 4. Colocar la funda sobre el pene, **dejando un espacio entre el glande y el tubo de la funda** para favorecer la salida de la orina.
 5. Desenrollar la funda sobre la tira adhesiva y **presionar suavemente** para asegurar una buena adherencia.
 6. Conectar la funda a la bolsa colectora de orina.
-

Retirada

Enrollar cuidadosamente la funda sobre sí misma para facilitar su retirada.
A continuación, retirar la tira adhesiva de doble cara.

Advertencias

- **No utilizar el producto en caso de alergia conocida al látex.**
- Se recomienda **cambiar la funda cada 24 horas**.
- Es esencial mantener una **higiene local cuidadosa** antes de la aplicación.
- **No apretar demasiado** la tira adhesiva para evitar problemas de circulación.
- Producto **no estéril, no esterilizable**.
- Se recomienda utilizarlo junto con las tiras adhesivas de doble cara.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Cualquier incidente grave derivado del uso de este dispositivo médico debe ser notificado al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida.

Eliminación

Desechar el dispositivo médico de acuerdo con la normativa local de eliminación de residuos.
No contiene sustancias tóxicas.