

Préservatif urinaire masculin pour incontinence – Instructions d'utilisation

Application

1. Lavez et séchez le pénis avant l'utilisation et, si nécessaire, rasez les poils pubiens.
N'utilisez pas de talc ni de crèmes.
 2. Retirez la pellicule protectrice **d'un seul côté** de la bande adhésive double face.
 3. Enroulez la bande en spirale autour du pénis et retirez la seconde pellicule.
 4. Placez le préservatif sur le pénis, **en laissant un espace entre le gland et le tube du préservatif** pour faciliter l'écoulement de l'urine.
 5. Déroulez le préservatif par-dessus la bande adhésive et **appuyez doucement** pour assurer une bonne adhérence.
 6. Connectez le préservatif au sac collecteur d'urine.
-

Retrait

Roulez délicatement le préservatif sur lui-même pour faciliter son retrait.
Retirez ensuite la bande adhésive double face.

Avertissements

- **Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie connue au latex.**
- Il est recommandé de **changer le préservatif toutes les 24 heures.**
- Une **hygiène locale rigoureuse** est essentielle avant l'application.
- **Ne pas trop serrer** la bande adhésive pour éviter les problèmes de circulation.
- Produit **non stérile, non stérilisable.**
- À utiliser en combinaison avec les bandes adhésives double face.
- Tenir hors de portée des enfants.

Tout incident grave lié à l'utilisation de ce dispositif médical doit être signalé au fabricant ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous résidez.

Élimination

Éliminez le dispositif médical conformément à la réglementation locale sur les déchets.
Ne contient pas de substances toxiques.