

Ανδρικό ουρολογικό προφυλακτικό για ακράτεια – Οδηγίες χρήσης

Εφαρμογή

1. Πλύνετε και στεγνώστε το πέος πριν από τη χρήση και, αν χρειάζεται, αφαιρέστε τις ηβικές τρίχες.
Μην χρησιμοποιείτε τάλκ ή κρέμες.
 2. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ **από τη μία μόνο πλευρά** της αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψης.
 3. Τυλίξτε την ταινία σπειροειδώς γύρω από το πέος και αφαιρέστε το δεύτερο φιλμ.
 4. Τοποθετήστε το προφυλακτικό στο πέος, **αφήνοντας ένα κενό μεταξύ της βάλανος και του σωλήνα του προφυλακτικού** για να διευκολύνετε τη ροή των ούρων.
 5. Ξετυλίξτε το προφυλακτικό πάνω από την αυτοκόλλητη ταινία και **πιέστε απαλά** για να εξασφαλίσετε σωστή επικόλληση.
 6. Συνδέστε το προφυλακτικό με την ουροσυλλεκτική σακούλα.
-

Αφαίρεση

Τυλίξτε προσεκτικά το προφυλακτικό για να διευκολύνετε την αφαίρεσή του.
Στη συνέχεια, αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία.

Προειδοποιήσεις

- **Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας στο λάτεξ.**
- Συνιστάται να **αντικαθίσταται το προφυλακτικό κάθε 24 ώρες.**
- Η **καλή τοπική υγιεινή** είναι απαραίτητη πριν από την εφαρμογή.
- **Μην σφίγγετε υπερβολικά** την αυτοκόλλητη ταινία ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κυκλοφορίας.
- Το προϊόν είναι **μη αποστειρωμένο, δεν αποστειρώνεται.**
- Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις αυτοκόλλητες ταινίες.
- Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με τη χρήση της ιατρικής συσκευής πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διαμονής.

Απόρριψη

Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για ιατρικά απόβλητα.
Δεν περιέχει τοξικές ουσίες.