

Guaina urinaria maschile – Istruzioni d'uso del dispositivo medico

Applicazione

1. Pulire ed asciugare il pene prima dell'applicazione, se necessario, eliminare i peli pubici.
Non usare talco o creme.
 2. Rimuovere da un solo lato la pellicola protettiva della banda biadesiva.
 3. Applicare la banda a spirale attorno al pene e rimuovere la seconda pellicola.
 4. Posizionare la guaina sul pene, **lasciando uno spazio tra il glande e il tubicino della guaina** per favorire il deflusso dell'urina.
 5. Srotolare la guaina sopra la banda biadesiva ed esercitare una **lieve pressione** per farla aderire bene.
 6. Collegare la guaina alla sacca urinaria.
-

Rimozione

Arrotolare delicatamente la guaina su se stessa per facilitarne la rimozione.
Successivamente rimuovere la banda biadesiva.

Avvertenze

- **Non utilizzare il prodotto in caso di nota allergia al lattice.**
- Si raccomanda di **sostituire la guaina ogni 24 ore.**
- Si raccomanda una **scrupolosa igiene locale** prima dell'applicazione.
- **Non stringere troppo** la banda biadesiva per evitare problemi circolatori.
- Prodotto **non sterile, non sterilizzabile.**
- Se ne consiglia l'utilizzo in abbinamento alle bande biadesive.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave dovuto all'utilizzo del dispositivo medico, sia al Fabbricante sia all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Smaltimento

Smaltire rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.
Non sono presenti sostanze tossiche.