

Preservativo urinário masculino para incontinência – Instruções de uso

Aplicação

1. Lave e seque o pênis antes do uso e, se necessário, remova os pelos pubianos.
Não utilize talco nem cremes.
 2. Remova a película protetora de **um dos lados** da fita adesiva dupla face.
 3. Enrole a fita adesiva em espiral ao redor do pênis e remova a segunda película.
 4. Coloque o preservativo sobre o pênis, **deixando um espaço entre a glândula e o tubo do preservativo** para facilitar o escoamento da urina.
 5. Desenrole o preservativo sobre a fita adesiva e **pressione suavemente** para garantir boa aderência.
 6. Conecte o preservativo à bolsa coletora de urina.
-

Remoção

Enrole cuidadosamente o preservativo para facilitar a remoção.
Em seguida, remova a fita adesiva dupla face.

Advertências

- **Não utilize o produto se tiver alergia conhecida ao látex.**
- Recomenda-se **trocar o preservativo a cada 24 horas.**
- **Higiene local cuidadosa** antes da aplicação é essencial.
- **Não aperte excessivamente** a fita adesiva para evitar problemas circulatórios.
- Produto **não estéril, não esterilizável.**
- Recomendado o uso em combinação com fitas adesivas dupla face.
- Mantenha fora do alcance das crianças.

Qualquer incidente grave decorrente do uso deste dispositivo médico deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador reside.

Descarte

Descarte o dispositivo médico conforme as normas locais de eliminação de resíduos.
Não contém substâncias tóxicas.