

Muški urinarni kondom za inkontinenciju – Uputstvo za upotrebu

Primena

1. Operite i osušite penis pre upotrebe, po potrebi uklonite stidne dlačice.
Ne koristite talk ni kreme.
 2. Uklonite zaštitnu foliju **sa jedne strane** dvostrane lepljive trake.
 3. Namotajte traku u spirali oko penisa i zatim uklonite drugu foliju.
 4. Postavite kondom na penis, **ostavljajući razmak između glansa i cevčice kondoma**, kako bi se omogućilo slobodno oticanje urina.
 5. Odmotajte kondom preko trake i **blago pritisnite** kako bi dobro prijanjao.
 6. Povežite kondom sa urinarnom kesom.
-

Uklanjanje

Pažljivo urolajte kondom kako biste olakšali uklanjanje.
Zatim uklonite lepljivu traku.

Upozorenja

- **Ne koristite proizvod ako imate poznatu alergiju na lateks.**
- Preporučuje se da se **kondom menja svakih 24 sata.**
- **Temeljna lokalna higijena** je neophodna pre upotrebe.
- **Ne zatežite previše** traku kako biste izbegli probleme sa cirkulacijom.
- Proizvod je **nesterilan, nije sterilizabilan.**
- Preporučuje se upotreba sa dvostranim lepljivim trakama.
- Čuvati van domašaja dece.

Svaki ozbiljan incident koji nastane kao posledica upotrebe medicinskog sredstva mora biti prijavljen proizvođaču i nadležnom organu države članice u kojoj korisnik boravi.

Odlaganje

Odložite proizvod u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju medicinskog otpada.
Ne sadrži toksične supstance.